

Elements utiles à l'utilisation d'un système de premiers secours avec défibrillateur connecté SWISSDEFI Extérieur



Léopold Stoessel
Sales Manager Romandie
leopold.stoessel@solumed.ch
+41 79 748 27 99



Numéros d'urgence suisses



144

Sanitätsnotruf
Urgences Santé
Ambulanza



117

Polizei
Police
Polizia



118

Feuerwehr
Pompiers
Pompieri



1414

Rega



145

Tox Info Suisse
Tox Info Suisse
Tox Info Suisse



112

Europäischer Notruf
Numéro d'urgence
européen
Numero d'emergenza
europeo



Code pénal

(Article 128)



Quelle: autobild.de

- L'article 128 du Code pénal suisse sanctionne **l'omission de porter secours en cas de danger immédiat de mort**. En revanche, il faut en conclure que lors de l'application du BLS (Basic Life Support, réanimation de base) et du DEA (défibrillateur externe automatisé) selon sa meilleure connaissance et conscience, des conséquences juridiques sont pratiquement exclues. **Sans ces mesures, le patient meurt ; une mesure incorrecte ne peut pas être poursuivie juridiquement selon le droit suisse en vigueur.**
- **La plus grande erreur consiste à ne pas porter secours.**

Quelle: generalibalans.sk

Chaîne de survie

1. Reconnaissance de l'arrêt cardiaque et alerte → **APPEL DU 144**
Réanimation de base précoce avec accent sur le massage cardiaque
2. Défibrillation précoce
3. Mesures avancées de réanimation efficaces par des professionnels
4. Prise en charge interdisciplinaire après un arrêt cardiaque à l'hôpital




Le facteur temps, l'enjeu

Sauver des vies

Le facteur temps, l'enjeu

Les services de secours mettent en moyenne 12 minutes pour arriver sur les lieux.

Or si on utilise un défibrillateur **dans les 3 à 5 minutes après que la personne s'est effondrée (arrêt cardiaque)**, ses chances de survie augmentent fortement, **jusqu'à 50 à 70 %**.

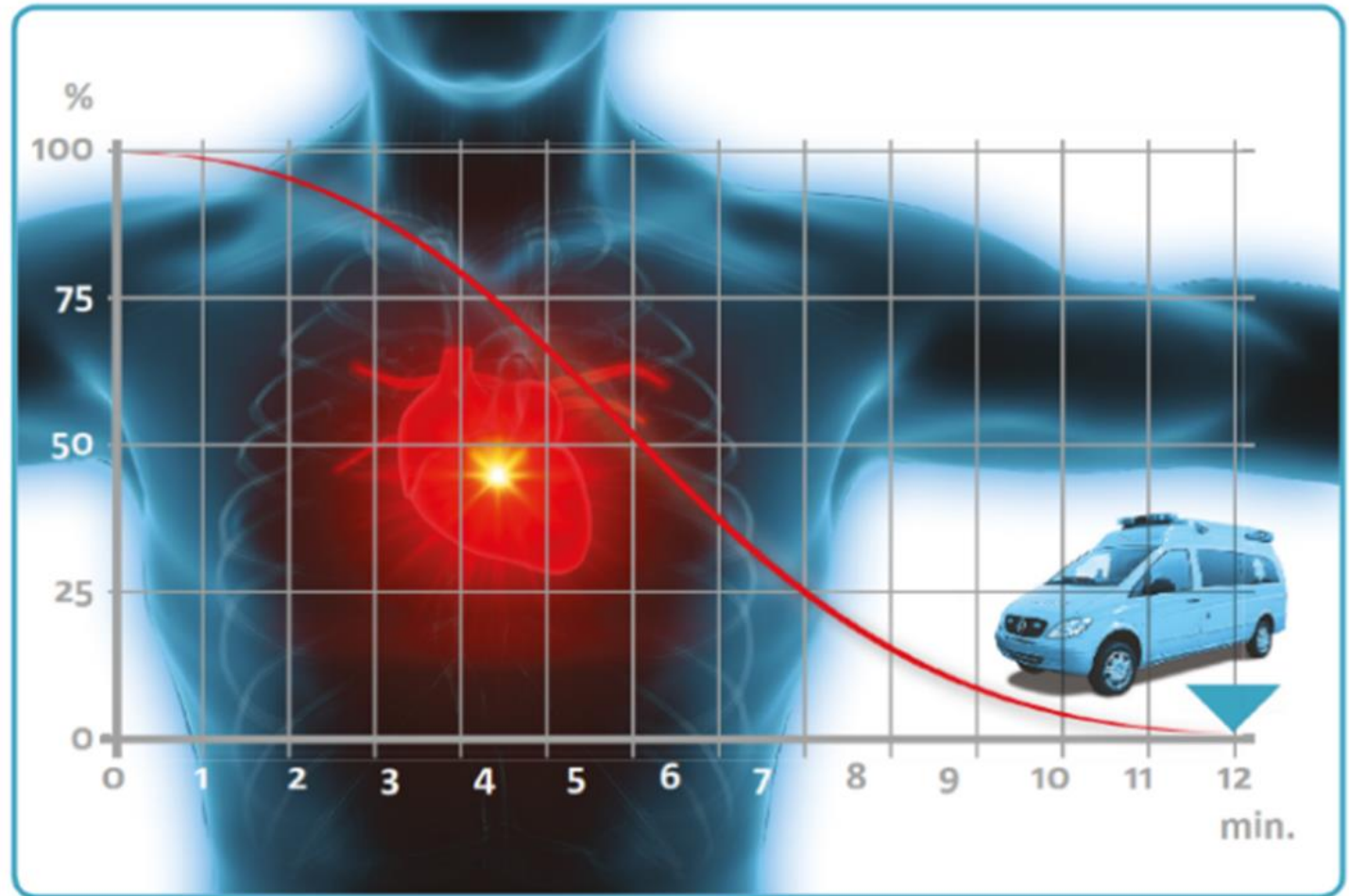

Le système de premiers secours Swissdefi



Le coffre de premiers secours Swissdefi



Connectivité pour la surveillance du système à distance de l'état des DAE 24h/24, 7j/7.

Défibrillateur



Electrodes au dos de l'appareil

Bouton d'appel du 144

En cas d'**URGENCE** ou en cas de doute utilisez le système d'**URGENCE** d'appel du 144 et faites vous aider par l'opérateur

Bouton d'appel du 144

- A l'activation →



Connection directe avec la centrale d'appel du 144

- Le personnel médical de la centrale assiste et guide pas à pas les premiers intervenants
- **Dès l'activation du système** : La centrale du 144 reçoit la geolocalisation du lieu d'activation du système.
- **Dès l'activation du système** : Envoi de SMS sur vos numéros mobiles préinscrits avec coordonnées de géolocalisation du lieu d'intervention.

Le défibrillateur

Marche / Arrêt

Écran LCD

Bouton
Adulte / enfant

Bouton de choc



Bouton changement de langue
Français / Anglais / Allemand



Electrodes au
dos de l'appareil

1. Allumez le défibrillateur
2. Placez les électrodes comme indiqué sur la vidéo
3. Analysez le rythme cardiaque et donnez l'autorisation de choc **si nécessaire,**
Il est absolument impossible de mal l'utiliser !

Défibrillateur automatique externe (DAE)

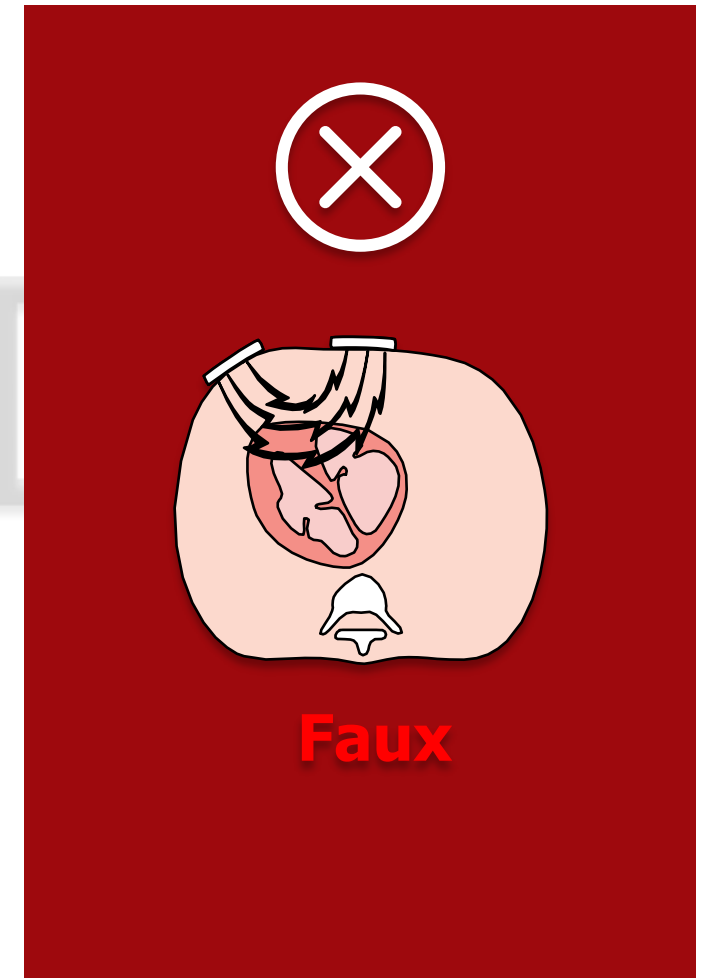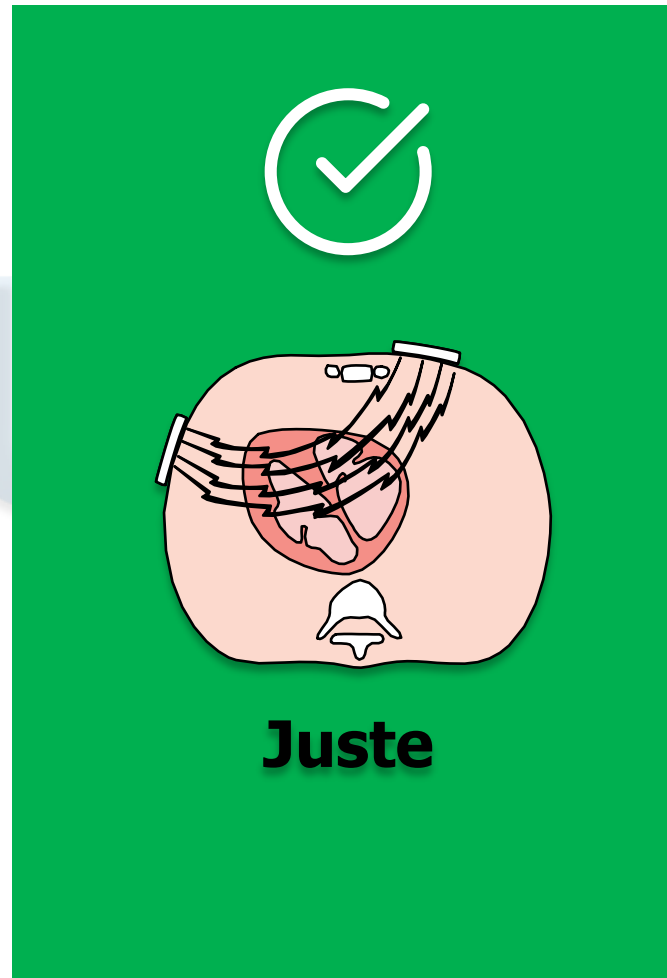

Dois-je utiliser un AED si la victime est enceinte OU à un stimulateur cardiaque?
(PACEMAKER)

Oui, jamais refuser l'utilisation d'un AED sur une personne avec un ACR
(Arrêt cardio-Respiratoire)



**VOUS NE FEREZ JAMAIS RIEN DE PIRE QUE DE NE PAS AGIR (OBLIGATION
LEGALE=ALARMER)**

Mesures de précaution



- Ne pas réanimer directement dans l'eau
(Sortir le patient de l'eau)
- Surface dure et plane
(De préférence poser le patient au sol)
- Ne jamais réanimer sur une table ou un banc
(Risque de chute du patient)



Défibrillateur automatique externe (DAE) Automated external Defibrillator (AED)

Signalisation

La signalisation des appareils se fait de préférence avec ce symbole
(bien qu'il existe aussi d'autres symboles similaires avec un cœur et un éclair)

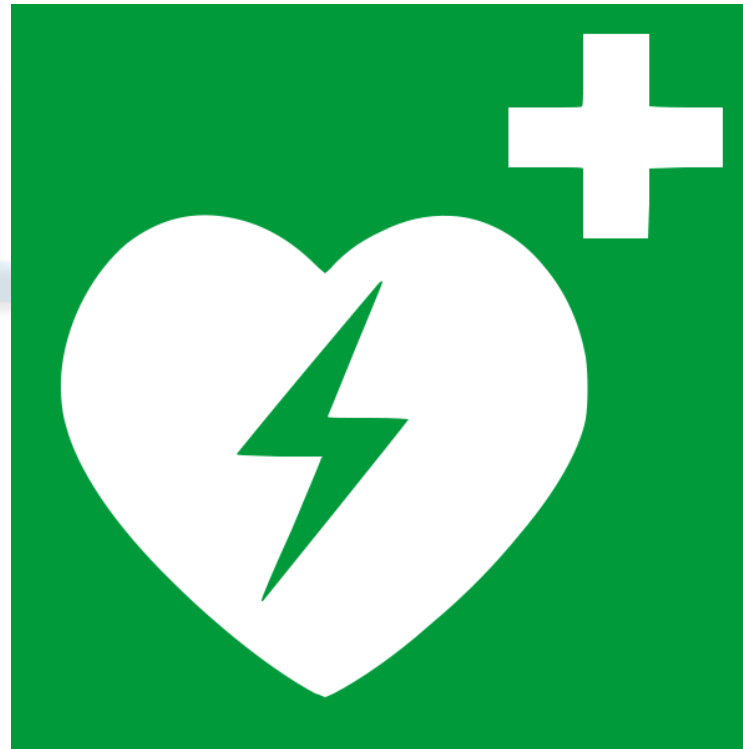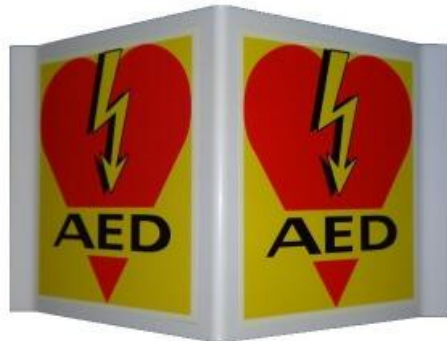

Signes possibles d'un arrêt cardiaque



- Effondrement soudain
- Aucune réaction aux appels forts
ni au secouement
- Respiration absente ou anormale